

Funktioner på stolen.

Nakkestøtte (ekstraudstyr).

Kan justeres op – ned og frem – tilbage.

Ryg skai med Velcro.

Kan dybdejusteres.

Armlæn, højdejusterbar og
Opklappelige.

Sædepude med bækkenglider for spand

Kan have forskellige udformning

Sædehøjdejustering, i 5 trin.

Positioneringsbolt trækkes ud i

Begge sider og højden kan justeres.

Tips: stolen kan ligges ned under justering.

Fodhviler, aftagelige.

Kan løftes af eller drejes til siden

Fodplader kan klappes op.

Klips-lås til højdejustering.

Klips trækkes helt ud ved justering.

Bremsepedal ved hjul.



Sædehøjde i top.



Fodplader drejet til siden.