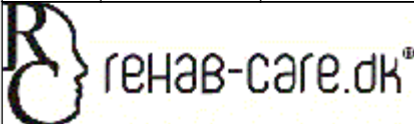


ITEM NO.	PART NUMBER	Description	Flad/QTY.
1	DSL22000	Day care stol	1
2	DSLHynde-ben	Hynde ben	1
3	DSLHynde-sæde	Hynde sæde	1
4	DSLHynde-ryg	Hynde ryg	1
5	Maskinsko ø55-M10	Maskinsko	1
6	50X40 PROP-01	Plastprop	1
7	Linak HB forlænger	Service stik	1
8	PX0685 app-stik	Net stik hun	1
9	60X30 Flad oval	Plastprop grå 60x30 f-oval	4
10	DSL6000	Holder for armlæn højre	1
11	DSL6100	Armlæn venstre	1
12	ø30 prop	ø30 plastprop	3
13	200-090-003	gevindstykke for sengehest	1
14	200-090-001	Konus greb plast	1
15	9142	Låsepal	1
16	9911	Låsehus for sengehest	1
17	armpude		2
18	DSL2460	Benstøtte	1
19	PU-RU-400-S	Rygpude	1
20	PAF 15090 P10	Kravebøsning ø17/15-9mm	2
21	M10-spec-bolt-ETG	Spec bolt M10	2
22	ø33,7 prop	Plastprop ø33,7	1
23	DSL6200	Holder for armlæn venstre	1
24	DSL6300	Armlæn højre	1
25	U-SCHV-20	Knæled	2
26	DSL1711	Skubbe håndtag	1

Rev	Date	Note
A	26-10-14	-vægt

	Scale: 1:10
	Paper: A3

Sheet 1 of 1


Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk

Description: Day Care stol komplet B-model

Surface treatment: Color:

Drawn By: MG Drawn Date: 28-01-16

Weight: 199882.74 State: - ok Material:


 Drawing No.: DSL35000 Rev. A