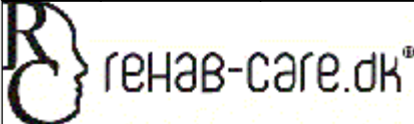



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	CG4-100	Gyn sæde	1
2	Spændegreb M10	Spændegreb M10	2
3	L40	Bøsning plast	8
4	DIN 912 M10 x 100 -- - 32N		2
5	W6-200	Liggeflade beslag	1
6	U6	Rygstykke	1
7	LA31 bund 200-ryg- 2	Linak motor MOT-08	1
8	CG9	Skinne for bakke	2
9	Farsfad 30x20x6		1
10	KOL2KB3-180-495- 001-150N	Gas fjeder 150N	1
11	F11	Låsehus nakke fysteje	1
12	F10	Udløserhåndtag fys	1
13	GYN-2000	Hjulramme	1
14	GYN-3000	Topbeslag	1
15	5945UAP100P30- 10 LH	Wheel low ø100 brake	4
16	GYN-202	Trækarm	2
17	LA31 bund 250- MOT-15	Linak motor 250mm	1
18	W10	Hynde gyn-del	1
19	F6-gyn	Ryg hynde	1
20	ISO 8678-M10x65-26- N		4
21	CB09	Linak styreboks	1
22	GYN-4000	løfte arm	1
23	PAF 15090 P10	Kravebøsning ø17-15-09	8
24	M10-spec-bolt-ETG	Spec bolt M10	9
25	60X30 PROP	Plast prop	2
26	Pin-ø10-47	Pin-ø10-47	2
27	Circlip DIN 471 - 10 x 1		4
28	PU4-740	Papir rulleholder	1
29	PU4-80	Stang til papirrulle	1

Rev	Date	Note
		Scale: 1:6 Paper: A3 Sheet 1 of 1
Description: Gyn. leje 2-delt		
Surface treatment:		Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15	
Weight: 99436.67	State: - ok	Material:
 Tolerances ISO 2768-mK		Drawing No.: GYN-1000 Rev.