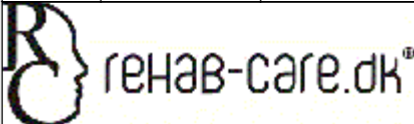



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	CG4-100	Gyn sæde	1
2	L36	Forlænger til gas fjeder	1
3	L36	Forlænger til gasfjeder	2
4	L-1000	Undervogn saks	1
5	F11	Låsehus nakke fysleje	3
6	Spændegreb M10	Spændegreb M10	2
7	L40	Bøsning plast	8
8	DIN 912 M10 x 100 --- 32N		2
9	50X30 PROP	Plast prop	2
10	32X32 PROP	Plast prop	4
11	DPUT60	Plastprop rørende	2
12	2476PJP 100 R26-28S 45	hjul	4
13	ISO 7380 - M10 x 16 --- 16N		8
14	W6-1000	Topramme	1
15	W6-200	Liggeflade beslag	1
16	L53-H	Glideklods	2
17	U6	Rygstykke	2
18	U8	Udløserbøjle 2 gas	2
19	L33-13	Stop for liggeflade	1
20	LA31 top 200		1
21	L8-A	Trendelenburg travers	1
22	CG9	Skinne for bakke	2
23	Forstød 30x20x6		1
24	KOL2KB3-180-495-001-300N		3
25	LA31 bund-01	Linak motor 100mm MOT-48	1
26	LA31 top		1
27	U5-A	Udløserbøjle for trendelenburg	1
28	L33-11	Beslag for håndtag	2
29	L45	Plast bøsning	2
30	F10	Udløserhåndtag fys	1
31	L39-4	Beslag for sædemotor	1
32	CG4-N	Gyn sæde	1
33	CG4-5	Beslag for CG-4	1

Rev	Date	Note

 Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk	Scale: 1:8
	Paper: A3
	Sheet 1 of 1
Description: <b>Muliti-gyn. leje 3-delt</b>	
Surface treatment:	Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15
Weight: 89609.38	State: - ok
Material:	
 Tolerances ISO 2768-mK	Drawing No.: <b>MU-4000</b>
	Rev.