



## Funktioner på stolen.

Nakkestøtte.

Kan justeres op – ned og frem – tilbage.

Sæde vinkel greb.

Ryg skai med Velcro.

Kan dybdejusteres.

Armlæn, højdejusterbar og  
Opklappelige.

Sædepude med bækkenglider  
for spand.

Kan have forskellige udformning

Bremsepedal ved hjul.

Klips-lås til højdejustering.

Klips trækkes helt ud ved justering.



Sædehøjdejustering, i 5 trin.

Positioneringsbolt trækkes ud i

Begge sider og højden kan justeres.

Tips: stolen kan ligges ned under justering



Fodplader drejet til siden.

Fodplader kan klappes op

Fodhviler, aftagelige.

Kan løftes af eller drejes til siden