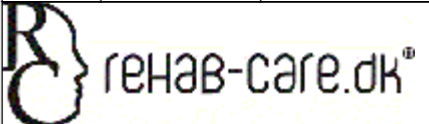



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	Default/ QTY.
1	SØ11-02	Hjulramme for flydeleje	1
2	BL1-400-V-02	Søjlemotor MOT-61	1
3	BL1-400-02	Søjlemotor MOT-61	1
4	SØ13	Gavlbojle	2
5	L41	Bremsestang L=663	2
6	SL-1800-02	Bespænding venstre	1
7	SL-1500-02	Bespænding højre	1
8	SL-1900-02	Slæde for leje	1
9	SL-1200	Holder for kuglebøsning	6
10	L53-H	Glideklods	4
11	CB20	Linak styreboks	1
12	SØ26-02	Skærm for styreboks	1
13	Bearing-LME20UU-Rollco	Rulle leje	8
14	150mm hjul kort sokkel	150mm hjul kort sokkel	2
15	150mm hjul kort sokkel retning	150mm hjul kort sokkel retninglås	2
16	LA23-150-bund-02	LA23 150mm	2
17	SØ28-02	Ryg stykke	1
18	PAF 14090 P10	Krævebøsning ø14/12-9mm	2
19	ISO 7380 - M10 x 20 - -- 20N		2
20	SL-1070-02	Laminatplade liggeflade	1
21	SL-1070-03	Laminatplade flydeleje	1
22	SL-1070-04	Laminat plade til flydeleje	2
23	SØ22-14-02	Laminatplade ryg	1
24	LA23-200-1500N	LA23 200mm 1500N	1
25	LA23-300-1500N	LA23 300mm 1500N	2
26	SHM-1600	Tilbehørskinne	2
27	KR-madras styr	Madrasstyr plast	4
28	SL-1300-02	Endestykke højre	1
29	SL-1012-02	Aksel for breddejustering	2
30	SL-1400-02	Længdevange	2
31	SL-1600-01	Topramme for flyderamme	1
32	SL-1047-02	Skærm for leje	2
33	DIN 912 M8 x 12 --- 12N		4
34	SL-2100-02	Endestykke venstre	1
35	60X40 PROP	Plast prop 60x40	4
36	L16-6	Afstandsrør L10,5	2
37	L11-10	Bremsepedal højre	2
38	L11-11	Bremsepedal venstre	2

Rev	Date	Note

 Cypresvej 3 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk	Scale: 1:10
	Paper: A3
	Sheet 1 of 2

Description: Flydeleje med motor i ryg	
Surface treatment:	Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15
Weight: 137352.11	State: - ok
Material:	

 Tolerances ISO 2768-mK	Drawing No.: SØ100	Rev.
---	--------------------	------