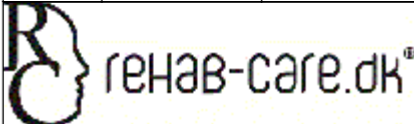



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	L53-H	Glideklods	4
2	F3-motor		1
3	F2	Hoved-stykke	1
4	BL1-400-V	Søjle motor MOT-61	1
5	BL1-400	Søjle motor MOT-61	1
6	CB06T	Styreboks	1
7	F1-200	Sæderamme fys	1
8	LA31 bund 150 s		2
9	LA31 top 150		2
10	F10	Udløserhåndtag fys	1
11	F8	Holder for gasfjeder	1
12	GAS-02		3
13	GAS-17		1
14	F11	Låsehus nakke fysleje	3
15	GAS-12-500N	Gasfjeder 500N	2
16	2474DYK125R26-28S45	Hjul 125mm	4
17	L1-B-SØ	Hjulramme søjle	1
18	W6-1000	Topramme	1
19	SØ3	Top plade til søjle	2
20	SØ3-1	Aksel for klods	4
21	L36	Forlænger til gasfjeder	2
22	SØ29	Holder for styring	1
23	DIN 912 M10 x 40 --- 40N		1
24	DIN 1587 - M10 -- NUC		1
25	SØ29-2	Ophæng til gas	1
26	SØ29-3	Ophæng til gas	1
27	BA18	Batteri	1
28	U8	Udløserbøjle 2 gas	1
29	cb16		1
30	ø20 prop		2
31	U-11	Ben-del hynde	1

Rev	Date	Note

 Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk	Scale:	1:8
	Paper:	A3
Sheet 1 of 1		
Description: <b>3-delt fys-leje søjle</b>		
Surface treatment:		Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 18-12-15	
Weight: 125657.37	State: - ok	Material:
 Tolerances ISO 2768-mK	Drawing No.: <b>SØ300</b>	
	Rev.	