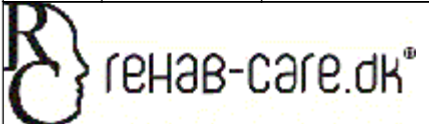



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	SØ15	Hjulramme	1
2	SØ16	Bremsestang	1
3	SKA28-1	Medbringer bremse	2
4	BL1-400-02	Søjlemotor MOT-61	1
5	BL1-400-V-02	Søjlemotor MOT-61	1
6	SØ3-10	Topplade røngten leje	2
7	SØ15-10	Skærm til røngtenleje	1
8	SØ3-1	Aksel for klods	2
9	L53-H	Glideklods	2
10	SØ10-03	Topramme røngten	1
11	SØ28-02	Ryg stykke	1
12	LA23-150-bund-02	LA23 150mm	2
13	SØ22-14-02	Laminatplade ryg	1
14	SØ22-8-02	Laminatplade ben	1
15	SØ17-1	Laminat plade til flydeleje	2
16	SØ13	Gavlbojle	2
17	KR-madras styr	Madrastyr plast	4
18	60X60 PROP	Plastprop 60x60	4
19	40X40 PROP	Plastprop 40x40	4
20	Pedal-højre	Bremsepedal	1
21	Pedal-venstre	Bremsepedal	1
22	L41	Bremsestang L=663	1
23	Jumbo	CBJ styring	1
24	CU20	CU20 styring	1
25	Fenderhjul ø100-15,5	Fenderhjul	4
26	SHM-2000	Tilbehørskinne	2
27	SH-200-H	Sengehest komplet højre	1
28	L26-10	Lap	4
29	L26-200	Afstandsrør SH	2
30	SH-200-V	Sengehest komplet venstre	1
31	5444-46PJT25R36-32	125mm hjul kort sokkel	4
32	ALM madras 2	Madras til forflytning	1

Rev	Date	Note

 Cypresvej 3 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk	Scale: 1:10
	Paper: A3
	Sheet 2 of 2

Description: Røntgemleje	
Surface treatment:	Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15
Weight: 264111.45	State: - ok
Material:	

 Tolerances ISO 2768-mK	Drawing No.: SØ30000	Rev.