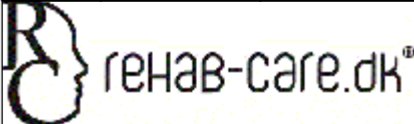



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	TS-22600	Stoleramme til fast stol	1
2	5377PJPT125P30-11 Levina	ø125 hjul med bremse	2
3	sædepude lukket front		1
4	ts-8150	Fodhviler komplet højre	1
5	ts-8250	Fodhviler komplet ventre	1
6	ts-7500	Holder for armlæn	2
7	Armstotte-360		2
8	ø25 prop	Plast prop	2
9	ts-5200	højde rør	2
10	Krykke lås ø25		4
11	BRF-ALU-SI-L-VA		1
12	BRF-ALU-SI-R-VA		1
13	ts-6007	vinkel rør for stol	2
14	SGD22-2	Prop for fodhviler	2
15	HA-BRF-ALU40-25		2
16	ts-7109	Spændplade	2
17	ts-7106	Ophæng for armlæn venstre	2
18	DIN 912 M8 x 25 --- 25N		4
19	DIN 912 M6 x 10 --- 10N		2
20	DIN 912 M12 x 80 --- 36N		2
21	MA-20f-hjul		2
22	6405-00 Rücken 14 Bgr		1
23	ts-9880	Ophæng til ryg	1
24	DIN 1587 - M12 -- NUC		2
25	ts-6138	Afstandsrør	2

Rev	Date	Note
		Scale: 1:8 Paper: A3 Sheet 1 of 2
Description: ErGo-SelPro 1000		
Surface treatment:		Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 07-02-18	
Weight: 34393.24	State: - ok	Material:
 Tolerances ISO 2768-cl		Drawing No.: TS-39000 Rev.