



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	L53-H	Glideklods	4
2	VP2000	Topramme vip	1
3	SE-4200	Topramme vippeleje	1
4	LA34-600 bund	LA34-400	1
5	VP5000	Hynde for oprejsningsleje	1
6	VP5200	Tilbehørskinne	2
7	PAF 2825115 P10	Kravebøsning ø28/25-11mm	4
8	VP6000	Bespænding til arm	2
9	VP6100	Ophæng for arm	2
10	Armstotte-PU-A-350-S	Armpude	2
11	Spændegreb M10	Spændegreb M10	1
12	ø40 håndskruex-50	håndskruer ø40x10 M10	1
13	håndtags greb		2
14	Maskinsko ø55-M10		2
15	VP6005	Rør for håndtag	2
16	DIN 912 M10 x 30 --- 30N		1
17	tgf-10-300-1200-sodemann	Træk gasfjeder 1200N	2
18	VP4010	Grad måler	1
19	VP4011	Viser	1
20	VP4600	Fodplade højre	1
21	L45	Plast bøsning	6
22	GFUDLOSERHOVED	Udløserhoved for gasfjeder	2
23	GFHANDTAG-kort	Håndtag for gasfjeder	2
24	VP701-pl	Laminat plade til fod	4
25	VP4700	Fodplade venstre	1
26	28x20x1.0 passkive		2
27	M5-VP	Saks for vippeleje	1
28	VP5300	Tilbehørskinne ende	1
29	VP4014	Aksel for fodplader	1
30	GAS-01	Gasfjeder 150N	2
31	SLS	Kontakt til løft	1
32	CB12	Styring	1
33	VP3005	Sideplade fod ophæng	2
34	0404001	Løftemotor MOT-38	1
35	M4	Saks udvendig	1
36	L-3000	Bundramme saks	1
37	Top-LA40-250		1
38	L6-A	Løfte laske	2
39	L16-2	Afstandsrør ø16x13	4
40	L-3000-03	Forbindelsesplade saks	2
41	SKA28-1	Medbringer bremse	2
42	ISO 7380 - M12 x 30 --- 30N		4
43	ISO 7380 - M8 x 20 --- 20N		4
44	Hexagon Nut ISO - 4032 - M8 - W - N		1
45	L-3010-01	Bremse stang	1
46	Pedal-højre	Bremsepedal	1
47	L-3000-50	Hjul holder	4

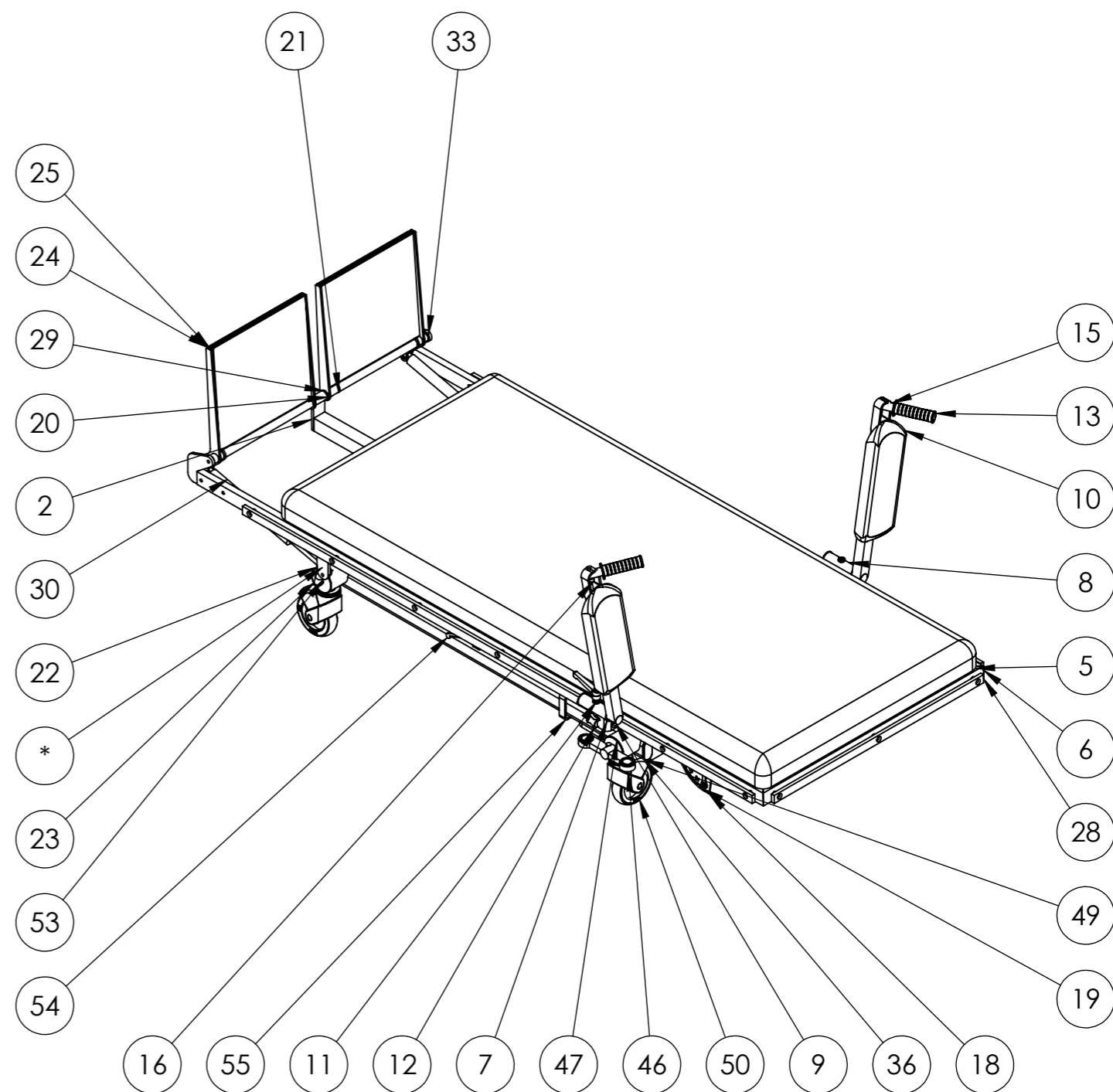

Rev	Date	Description
		Scale: 1:15
		Paper: A3
Sheet 1 of 1		
Description: Vippeleje		
Surface treatment:		Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 08-01-18	
Weight: 236056.98	State: - ok	Material:
 Tolerances ISO 2768-CL		Drawing No.: VP1000
		Rev.