

Sikkerhedseftersyn

I henhold til international standart EN/ISO 10535 anbefales det at lave et sikkerhedseftersyn en gang årligt.

Proceduren for sejleftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende.

En praktisk og en visuel gennemgang anbefales. Herved opdages stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt/mørt stof.

Reparationer må kun udføres af fabrikanten.

Service fra dag til dag

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Varenr.	HMI nr.	Beskrivelse	Størrelse
40019	89865	Helsejl med hoved støtte, Net	XSmall
40020	89866	Helsejl med hoved støtte, Net	Small
40021	89867	Helsejl med hoved støtte, Net	Medium
40022	89868	Helsejl med hoved støtte, Net	Large
40023	89869	Helsejl med hoved støtte, Net	XLarge
40024	89870	Helsejl med hoved støtte, Net	XXLarge
40013	89853	Helsejl med hoved støtte	XSmall
40014	89854	Helsejl med hoved støtte	Small
40015	89855	Helsejl med hoved støtte	Medium
40016	89856	Helsejl med hoved støtte	Large
40017	89857	Helsejl med hoved støtte	XLarge
40018	89858	Helsejl med hoved støtte	XXLarge

Kontakt Rehab-Care

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til produkter, priser, reparationer eller service.

Du kan ringe til os på +45 6915 3000, skrive til info@rehab-care.dk eller udfylde formularen på www.rehab-care/kontakt, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontorets åbningstider

Mandag – Torsdag 08:00 – 16:00
 Fredag 08:00 – 13:00



HELSEJL

Produceret med fokus på både brugervenlighed, komfort og æstetik.


Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

Tekniske Data:

Max belastning: 275 kg.
 Materiale: 100% polyester.
 Vaskeanvisning: Anvend et vaskemiddel uden optisk hvidt.
 Kan tørretumblers på lav temperatur.



Str.	Hoftebredde	Ryghøjde
XS	37 cm.	75 cm.
S	42 cm.	80 cm.
M	48 cm.	91 cm.
L	52 cm.	100 cm.
XL	68 cm.	100 cm.
XXL	78 cm.	100 cm.

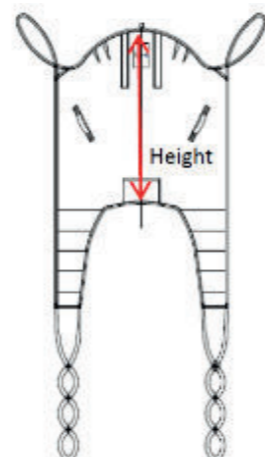

Leveres både i fast stof og i net

Universal helsejil med delte, brede, polstrede benstropper, som skal krydses ved brug. Med hovedstøtte og 2 udtagelige nakkestøtter.


Til brugere der har brug for støtte til hele kroppen, inkl. nakke og hoved. Velegnet til forflytninger både fra/til siddende og liggende stilling.

Har 4 ophængsmuligheder på benstropper og 2 ophængsmuligheder på skulderstropper, hvilket giver god mulighed for komfortabel siddestilling. Anvendes sammen med stationære eller mobile personløftere.

Passer til 2, 3 og 4 punkts åg.

Sejlet er udstyret med:

- Pålægningslomme
- Midteindikation, både øverst og nederst
- Styrestropper
- Farvekoder for størrelser
- Udtagelige nakkestøtter

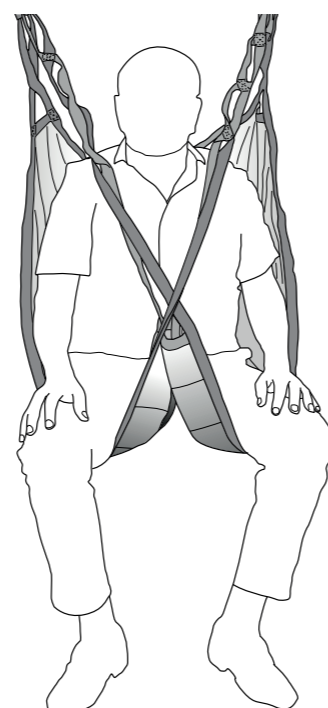

Løft fra siddende stilling

- 1) Sejlet placeres bag brugerens ryg, brug påsætningslommen, og skub sejlet så langt ind under brugeren som muligt. Midteindikationen skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Benstropper trækkes ind under brugerens lår, brug evt. glidestykke, eller placer foden på fodstøtte for at hæve lårbenet fra sædet.
- 3) Kryds benstropper, og placer sejlstropper på åget.
- 4) Løft forsigtigt brugeren op. Når stropper er strammet lidt, kan sejlet rettes til.

Løft fra liggende stilling

- 1) Brugeren vendes om på siden, sejlet foldes i et Z til midten, og den foldede del skubbes ind under brugeren. Vær opmærksom på, at midten skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Brugeren vendes om på ryggen og sejlet foldes ud. Benstropper føres ind under benene og krydses.
- 3) Hovedgærdet hæves hvis muligt, og stropper sættes på åg.
- 4) Brugeren kan nu løftes forsigtigt op, og sejlet kan rettes, når stropper er strakt ud.

Betingelser for brug af sejlet:

- Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug.
- Sejlet må kun bruges sammen med en personløfter godkendt efter DS/EN ISO 10535:2007 med 2, 3 eller 4 punkts åg.
- Der anvendes den korrekte størrelse sejl. Sejlet må ikke stramme eller gnave.
- Max løftekapacitet på 275 kg må ikke overskrides.
- Hjælperen er obs. på brugerens velbefindende under brug.
- Sejlet er tjekket iflg. tjekliste.

Tjekliste inden brug:

Har sejlet et eller flere af følgende mangler skal det kasseres.

- Tjek sejlet for manglende eller ulæselige mærkater.
- Tjek for ødelagte eller slidte syninger.
- Tjek for knuder på stropperne.
- Tjek for flænger, flosser eller huller.
- Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller på stropperne.

Mere end
20 års
erfaring