

## Sikkerhedseftersyn

I henhold til international standart EN/ISO 10535 anbefales det at lave et sikkerhedseftersyn en gang årligt.

Proceduren for sejleftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende.

En praktisk og en visuel gennemgang anbefales. Herved opdages stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt/mørt stof.

Reparationer må kun udføres af fabrikanten.

### Service fra dag til dag

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Varenr.	HMI nr.	Beskrivelse	Størrelse
40031	89841	Ståsejl med bælte	Xsmall
40032	89842	Ståsejl med bælte	Small
40033	89843	Ståsejl med bælte	Medium
40034	89844	Ståsejl med bælte	Large
40035	89845	Ståsejl med bælte	XLarge
40036	89846	Ståsejl med bælte	XXLarge

## Kontakt Rehab-Care

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til produkter, priser, reparationer eller service.

Du kan ringe til os på +45 6915 3000, skrive til [info@rehab-care.dk](mailto:info@rehab-care.dk) eller udfylde formularen på [www.rehab-care.dk/kontakt](http://www.rehab-care.dk/kontakt), så kontakter vi dig hurtigst muligt.

### Kontorets åbningstider

Mandag – Torsdag ..... 08:00 – 16:00  
 Fredag ..... 08:00 – 13:00



## STÅSEJL

Produceret med fokus på både brugervenlighed, komfort og æstetik.


Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

## Tekniske Data:


Max belastning: 250 kg.  
 Materiale: 100% polyester.  
 Vaskeanvisning: Anvend et vaskemiddel uden optisk hvidt. Ved vask skal spændet være klikket sammen. Kan tørretumblers på lav temperatur.



Str.	Bredde	Højde
XS	68 cm.	33 cm.
S	87 cm.	34 cm.
M	108 cm.	35 cm.
L	126 cm.	37 cm.
XL	141 cm.	39 cm.
XXL	151 cm.	41 cm.

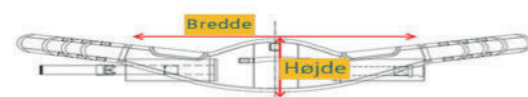

## BRUG AF STÅSEJL

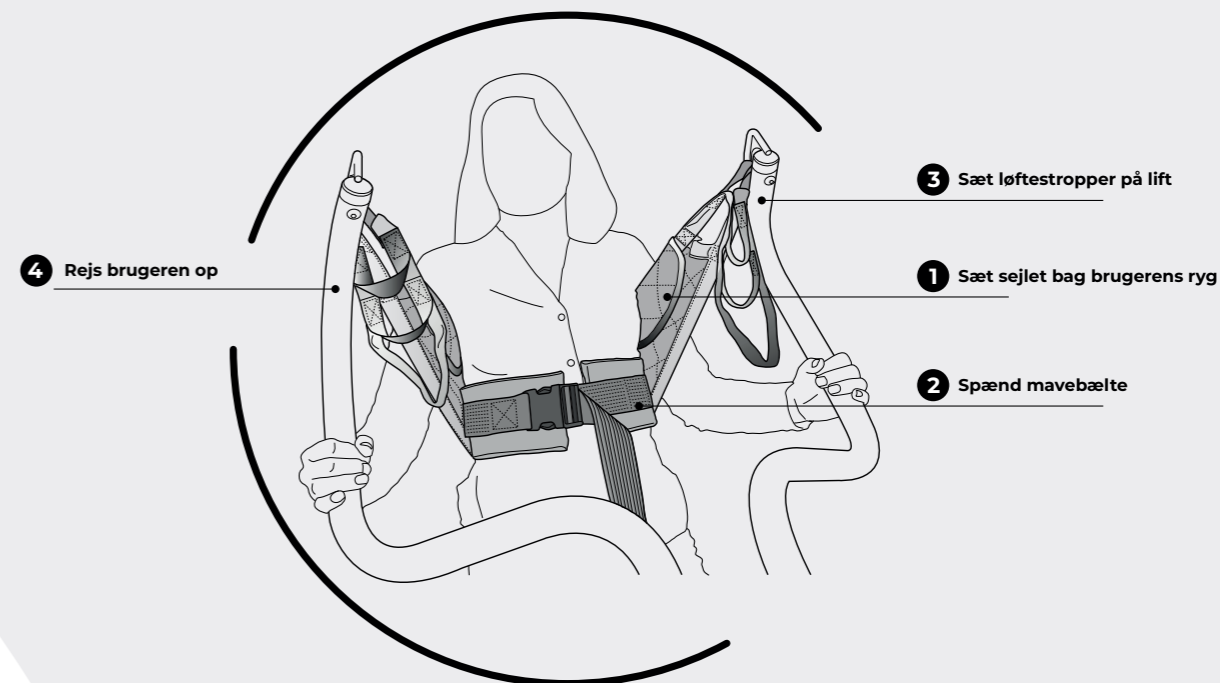

## Ståsejl

Ståsejl i kraftig quiltet kvalitet, med ekstra blød polstring ved armhulen og med et indstilleligt bælte-spænde. Anti-skrid på ryggen og bælte, med fire længder på stropper.

Anvendes kun sammen med stålift med to kroge, kun til brugere med ståfunktion. Anvendes til at få en bruger fra siddende til stående stilling eller omvendt.

Sejlet er udstyret med:

- Midteangivelse
- Farvekoder for størrelser
- Styrestrop

## Brug:

- 1) Sejlet placeres bag brugerens ryg ved at brugeren læner sig lidt frem. Midterstroppen skal følge brugerens rygsøjle. Sejlet placeres så bæltet sidder i taljen.
- 2) Det skridsikre stykke skal vende ind mod brugerens ryg.
- 3) Klik spændet sammen og stram bæltet.
- 4) Hægt stropperne på løftearmenes kroge. Vær opmærksom når du placerer stropperne på ståløfteren, så du er sikker på, de er placeret korrekt og med ens farver i begge kroge.
- 5) Løft nu forsigtigt brugeren op. Når stropperne er strakt ud, kan sejlet rettes til og mavebæltet strammes.

## Betingelser for brug af ståsejlet:

- Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer, der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug.
- Sejlet må kun bruges sammen med en stålofter godkendt efter DS/EN ISO 10535:2007 med to kroge.
- Der anvendes den korrekte størrelse sejl. Sejlet skal sidde til, når bæltet strammes.
- Max løftekapasitet på 250 kg må ikke overskrides.
- Hjælperen er obs. på brugerens velbefindende under brug.
- Sejlet er tjekket iflg. tjekliste.
- Brugeren har ståfunktion.

## Tjekliste inden brug:

Har sejlet et eller flere af følgende mangler skal det kasseres.

- Tjek sejlet for manglende eller ulæselige mærkater.
- Tjek for ødelagte eller slidte syninger.
- Tjek for knuder på stropperne.
- Tjek for flænger, flosser eller huller.
- Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller på stropperne.

Mere end  
20 års  
erfaring