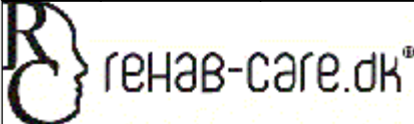



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	TS-22600	Stoleramme til fast stol	1
2	5377PJPT125P30-11 Levina	ø125 hjul med bremse	2
3	sædepude lukket front	sædepude lukket front	1
4	ts-8150	Fodhviler komplet højre	1
5	ts-8250	Fodhviler komplet venstre	1
6	Skai ryg-lang	Skai for ryg	1
7	ts-7500	Holder for armlæn	2
8	Armstøtte-360	Armstøtte pude	2
9	ø25 prop	Plast prop	2
10	ts-5200	højde rør	2
11	Krykke lås ø25		4
12	BRF-ALU-SI-L-VA	Bremse venstre	1
13	BRF-ALU-SI-R-VA	Bremse højre	1
14	ts-6007	vinkel rør for stol	2
15	SGD22-2	Prop for fodhviler	2
16	HA-BRF-ALU40-25		2
17	ts-7109	Spændplade	2
18	ts-7106	Ophæng for armlæn venstre	2
19	DIN 912 M8 x 25 --- 25N		4
20	DIN 912 M6 x 10 --- 10N		2
21	DIN 912 M12 x 80 --- 36N		2
22	R620x35-PU-GF	Selpro hjul 24"	2
23	DIN 1587 - M12 -- NUC		2
24	ts-6138	Afstandsrør	2

Rev	Date	Note

 <small>Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk</small>	Scale: 1:8
	Paper: A3
Sheet 1 of 2	
Description: ErGo-SelPro 1500 24" hjul	
Surface treatment:	Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 28-08-18
Weight: 27191.28	State: - ok
Material:	
 <small>Tolerances ISO 2768-cl</small>	Drawing No.: TS-39500
Rev.	